

Ergebnisse


Die fortschreitende Zeit und der Stress (wie auch die Freuden) des modernen Lebens führen dazu, dass die Haut älter wirkt. Die Zeichen der Hautalterung und der Einfluss der Sonne machen sich am deutlichsten im Gesicht eines Menschen bemerkbar. Es gibt zwar zahlreiche Methoden, von einfachen Cremes bis hin zu chirurgischen Eingriffen, mit denen die verschiedenen Schönheitsfehler behoben werden können, aber Hautspezialisten haben immer noch Verbesserungsmethoden gesucht, die ein geringes Risiko und keine Ausfallzeiten nach sich ziehen. Bei vielen herkömmlichen Methoden kann jeweils nur ein Problem behandelt werden, und oft sind diese Methoden mit einer langen Heilungsphase, erheblichen Schmerzen und potenziellen unerwünschten Nebenwirkungen

Sonnenschäden können reduziert werden.

verbunden. IPL™- Photorejuvenation ist eine nicht-invasive Methode zur Behandlung von Hautschäden, bei der die Hautoberfläche nicht angegriffen wird, daher entsteht keine Ausfallzeit. Intensiv gepulstes Licht (Intense Pulsed Light, IPL) kann zur sicheren und effektiven Behandlung einer ganzen Reihe von Hautproblemen im Gesichtsbereich eingesetzt werden, u.a. bei erweiterten Äderchen, gutartigen braunen Pigmentflecken, Altersflecken (durch Sonneneinwirkung entstandene Hautflecken), Unebenheiten und Poikilodermie.



Weitere Informationen über IPL-Lösungen für Ihre Hautprobleme erhalten Sie bei Ihrem Arzt. Oder schauen Sie mal bei www.skinandhealth.com vorbei.

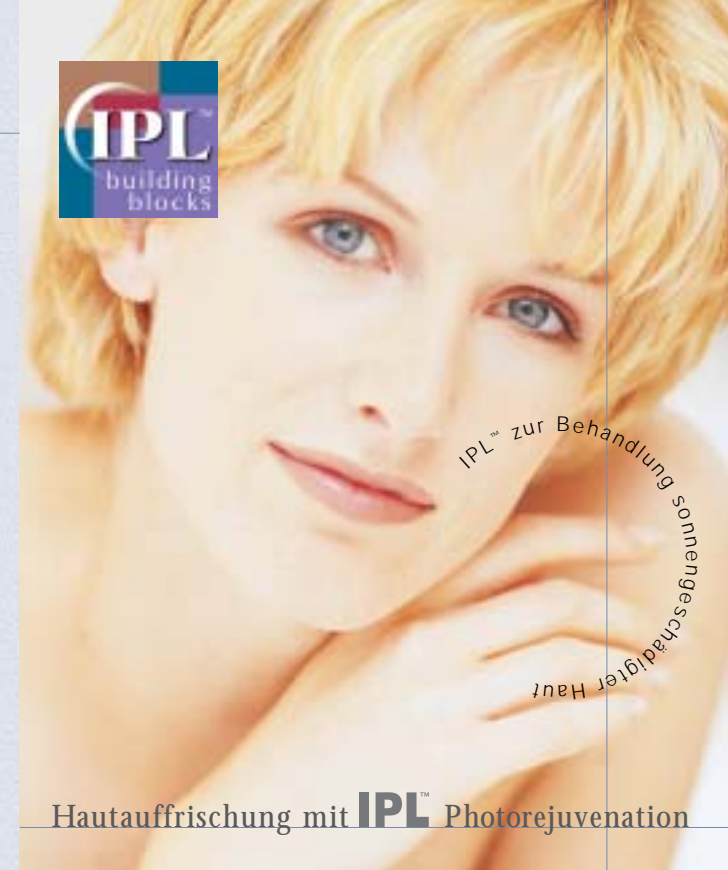

IPL™ zur Behandlung sonnenbeschädigter Haut

Hautauffrischung mit **IPL™** Photorejuvenation



Behandlungsbilder mit freundlicher Genehmigung von:
Patrick Bitter, Jr., M.D. - Campbell, California, USA
Jerry Darm, M.D. - Lake Oswego, Oregon, USA
Robert Weiss, M.D. - Hunt Valley, Maryland, USA

© 2002, Lumenis-Unternehmensgruppe.
IPL™ und Vasculight™ sind Marken von Lumenis.
PB P00 0205

Verleiht der Haut ein jugendlicheres Aussehen

Dramatische

Was ist intensiv gepulstes Licht?

Intensiv gepulste Lichttechnologie (IPL™) ist eine bahnbrechende Behandlungsmethode, die eine Vielzahl von gutartigen Hautveränderungen korrigiert, unter anderem Unebenmäßigkeiten der Gesichtshaut, Altersflecken, Muttermale, unerwünschte Haare, unansehnliche kleine Äderchen und andere Makel. Sie bietet eine zuverlässige nicht-invasive Lösung, die auf individuelle Bedingungen und Hauttypen zugeschnitten werden kann und so für hochwertige kosmetische Ergebnisse und uneingeschränkte Zufriedenheit sorgt. Dieses neue Verfahren wird Photorejuvenation genannt.

Wie wird Photorejuvenation durchgeführt?

Für gewöhnlich wird auf die zu behandelnde Stelle ein kühles Gel aufgetragen und Ihnen wird eine dunkle Brille zum Schutz vor dem hellen Licht aufgesetzt. Die glatte Glasoberfläche des IPL-Handstücks wird leicht auf Ihre Haut gelegt, und die Lichtimpulse werden aktiviert. Manche spüren einen schwachen Stich, wie das Zurückschnappen eines schmalen Gummibands. Eine betäubende Hautcreme könnte benutzt werden, wird jedoch selten benötigt. Die Behandlung erfolgt in der Regel in einer Reihe von Anwendungssitzungen, damit exzellente Langzeitergebnisse, minimale Nebenwirkungen und hohe Zufriedenheit gewährleistet sind. Jede einzelne Behandlung dauert circa zwanzig Minuten.

Weshalb sind Mehrfachbehandlungen notwendig?

Abhängig von der Vielfalt und der Stärke individueller Problematiken kann eine Reihe von vier bis sechs Sitzungen erforderlich sein. Sie können noch am gleichen Tag an Ihren Arbeitsplatz zurückkehren und Ihrem gewohnten Tagesablauf nachgehen. Durch die Aufteilung des vollen Programms in mehrere Behandlungsschritte sorgt das Verfahren für eine allmähliche Verbesserung mit gleichzeitig sehr geringem Risiko – und es entsteht keine behandlungsbedingte Ausfallzeit, eine Tatsache, die viele Menschen sehr schätzen.

So funktioniert IPL™



Rote Flecken, die durch geplatzte Blutgefäße verursacht werden, und braune Pigmentflecken, die durch die Sonne verursacht werden, sprechen auf intensiv gepulstes Licht an. Das Licht wird in Wärmeenergie umgewandelt, wenn es auf das Kollagen unterhalb der Hautoberfläche trifft.

Wie steht die Photorejuvenation im Vergleich zu anderen Behandlungsmethoden da?

Während es Laser gibt, die rote Flecken und geborstene Kapillargefäße behandeln, andere, die braune Flecken behandeln, und wieder andere, die für die oberflächliche Hautabtragung benutzt werden, sorgt doch keine dieser Technologien für eine Langzeitverbesserung von Teint und Gewebe so wie das IPL™-Photorejuvenationsprogramm. All das ohne die geringste Unterbrechung in Ihrem geschäftigen Lebensstil.

Für welche Hautprobleme ist Photorejuvenation geeignet?

Unebenmäßigkeiten durch Sonnenschäden und Hautalterung ("Photo-Aging")

Erweiterte Poren, matter Teint und andere Unebenmäßigkeiten oder Abnormalitäten der Gesichtshaut können das Wohlbefinden beeinträchtigen, ungeachtet dessen, wie jung und gesund man sich fühlt. Die IPL-Technologie verbessert gleichermaßen oberflächliche wie auch tiefere Hautschichten und verjüngt die Haut. Nach der Behandlungsserie ist eine deutliche Reduzierung der unerwünschten Pigmentierung zu erkennen. Dieselbe Behandlung eignet sich auch zur effektiven Auffrischung der Haut an Hals, Brust, Armen und Händen.

Gutartige vaskuläre Läsionen: Beschädigte Venen und Kapillargefäße


Das Gesicht verfügt über ein ausgedehntes Netzwerk von Venen und winzigen Blutgefäßen, den so genannten Kapillaren. Im Laufe der Jahre verursachen Hautalterung, Sonnenbäder und bestimmte Lebensstilfaktoren Brüche der Kapillaren, die als gerötete Flecken oder Striche im Gesicht erscheinen. Mit einer IPL-Behandlung können die beschädigten Venen und Kapillaren entfernt werden, so dass praktisch keine Spuren dieser Schönheitsfehler zurückbleiben.

Rosacea – durch erweiterte Blutgefäße hervorgerufene Rötungen

Viele Menschen leiden unter erweiterten Blutgefäßen, was zu einem roten Gesicht bzw. einer chronischen Errötung führt und den Betroffenen oft peinlich ist. Die IPL-Technik kann diese erweiterten Blutgefäße und die Gesichtsröte bei Frauen und Männern erfolgreich behandeln, ohne die umgebende gesunde Haut zu verletzen.



Durch Lichteinwirkung gealterte Haut ("Photo-Aging")
— Nach 4 IPL-Behandlungen

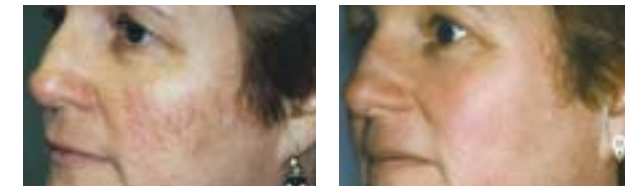

Rosacea — Nach 3 IPL-Behandlungen



Erweiterte Äderchen — Nach 2 IPL-Behandlungen